



Téléalarme Color Box VP2 4G

Localisation – Détecteur de chute – Alertes . . .

Avant-propos

Face aux défis du vieillissement et de la perte d'autonomie, **Mediwalk** révolutionne la **téléassistance** en proposant une solution sans abonnement, impliquant directement le **réseau familial et de proximité**.

Contrairement aux systèmes traditionnels, souvent associés à des coûts récurrents et à une gestion centralisée, **Mediwalk** met entre les mains des familles un dispositif **autonome et connecté**, permettant une prise en charge personnalisée et immédiate des alertes.

Grâce à la **Color Box VP2 Téléalarme 4G**, nous offrons une solution **sans engagement**, où chaque utilisateur peut gérer librement la sécurité de son proche, sans dépendre d'un centre d'appels ou d'un service tiers.

Les points forts de notre concept :

- ✓ **Aucune contrainte d'abonnement** : une seule acquisition suffit.
- ✓ **Un accès direct aux alertes et à la localisation** via une plateforme dédiée.
- ✓ **Un dispositif 4G sécurisé** pour une couverture optimale,
- ✓ **Une approche familiale et solidaire** : l'aidant reste au cœur de l'accompagnement.

Notre Téléalarme VP1 classée la plus performante par une étude CNSA en 2017



Avec **MEDIWALK**, la téléassistance devient plus accessible, plus humaine et totalement libre d'usage.



Téléalarme Color Box VP2 4G

Certifications

FCC ROHS CE



Présentation de notre concept

Présentation de notre concept

Avec **Mediwalk**, nous vous offrons une solution de **géo sécurité intelligente et accessible**, sans abonnement ni limitation dans le temps.

Dès l'acquisition de votre balise, **un espace privé** est créé sur notre **plateforme sécurisée de géolocalisation**. Vous pouvez y accéder à tout moment :

- ✔ Depuis notre interface web sécurisée
- ✔ Via notre application mobile disponible sur iOS et Android

Une connexion multi-utilisateur

- **La multi-connexion est possible**, permettant à plusieurs proches d'accéder simultanément aux données de suivi.
- Vous pouvez **localiser votre proche en temps réel** et suivre ses déplacements.
- Les **alertes sont envoyées à un nombre illimité de référents**, garantissant une réactivité optimale en cas d'urgence.

Un contrôle intelligent des déplacements


Grâce à notre système avancé de géo sécurité, vous pouvez configurer :

- ✔ **Des périmètres d'alerte** pour surveiller des zones spécifiques.
- ✔ **Des alertes de sortie, d'entrée ou de déviation de trajet** en fonction des déplacements de votre proche.

Sans abonnement, sans engagement

- **Aucun abonnement mensuel auprès de Mediwalk.**
- **Aucune restriction de durée d'utilisation.**
- Vous bénéficiez d'une solution **fiable, sécurisée et évolutive**, sans coûts cachés.

Avec **Mediwalk**, vous restez maître de la surveillance et de la protection de vos proches, sans intermédiaire.

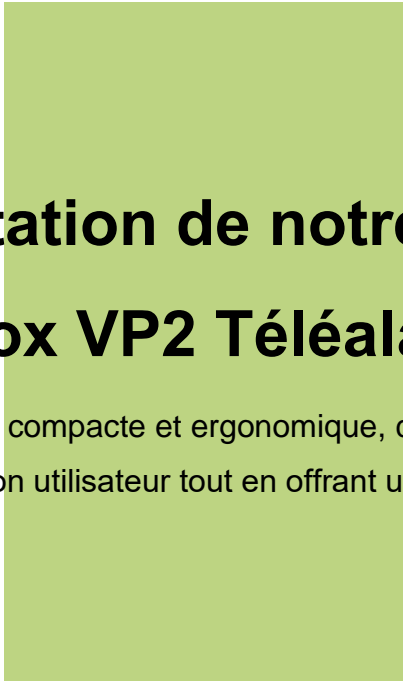

Présentation de notre Balise Color Box VP2 Téléalarme 4G

La **Color Box VP2** est une balise compacte et ergonomique, conçue pour garantir la sécurité et l'autonomie de son utilisateur tout en offrant un confort optimal.

Spécifications Techniques

Spécifications	Détails
Modèle	COLOR BOX V2 MEDIWALK -4G
Dimension	2.4*1.7*0.6 pouces/61mm * 44mm * 16mm
Poids	1.4 OZ / 40g
Batterie de secours	Rechargeable, 3.7V, 800mAh
Tension de charge	5V DC
Température de fonctionnement	-20 °C à + 80 °C pour le travail, -30 °C à + 70 °C pour le stockage
Autonomie de la batterie	24h
Imperméable	IP67
Capteur	Capteur de mouvement et de vibration
Connecteurs	4 broches-Aimant pour la charge
Emplacement pour carte SIM	Oui NANO
Mémoire flash	1 Mo
Microphone et haut-parleur intégrés	Oui
WIFI	802.11 b/g/n, 2.4G
BLE	BT5.0 LE
Chipset GPS	Ubx M8130 (prise en charge AGPS)
Soutien	GPS et Glonass
Fréquence du récepteur	1575.42MHz
Démarrage à froid	Environ 26s
Démarrage chaud	Environ 2s
Démarrage à chaud	Environ 1s
Antenne	Antenne céramique intégrée
Accessoires standard	COLOR BOX 4G, Chargeur : prise EU, Manuel d'utilisation FR, Par mail, Lanière tour de cou, Porte-clés, Boîte d'emballage, Base de chargement, Pochette sac, Bracelet montre, Clip ceinture, Fermeur de Sécurité, Borne BLE (1 Offerte)
Poids (tous les accessoires inclus)	0.4 KG/PCS

Se recharge sur sa station d'accueil (fournie) en 30mn,
ou à l'aide de son câble magnétique
(fourni).



Un choix de couleurs personnalisées

Disponible en 5 coloris élégants :

- ✓ Blanc
- ✓ Bleu
- ✓ Noir
- ✓ Vert
- ✓ Blanc (seconde variante)



Plusieurs modes de port adaptés aux besoins de chacun

La balise s'adapte au quotidien de son utilisateur grâce à **différentes options de port** :

- ✓ **Autour du cou** avec un **cordon inclus**
- ✓ **À la ceinture** grâce à son **clip robuste**
- ✓ **En attache-clés**, pour l'avoir toujours sur soi
- ✓ **Au poignet** (*en option*) avec un **bracelet montre sécurisé**



Une fixation sécurisée pour plus de sérénité



Pour une protection renforcée, le bracelet montre est équipé d'un **fermoir de sûreté amovible**, permettant de **fixer solidement la balise au poignet** et éviter toute perte accidentelle.

Une balise pensée pour s'adapter aux habitudes et aux besoins de chacun, tout en offrant une sécurité optimale.

Ce fermoir de sûreté est amovible, conçu dans nos ateliers, un brevet déposé. Ce bracelet verrouillable offre un sentiment de sécurité et de protection aux proches et aux soignants, tout en permettant à la personne atteinte d'Alzheimer de conserver une certaine indépendance.




Les Alertes



Communication GSM

- ✓ Appels entrants et sortants
 - ✓ Décrochage automatique
-

Périmètres de sécurité

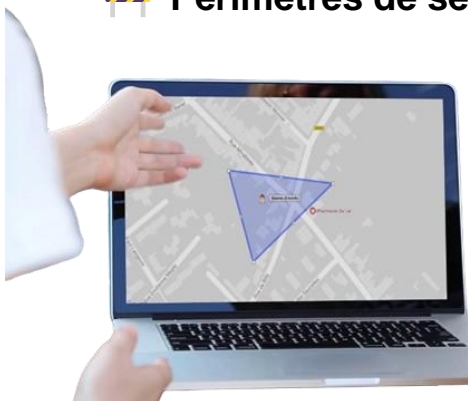

- ✓ Alerte en cas de **sortie**,
Entrée ou déviation de route du périmètre défini
-

Détection de chute

- En cas de chute détectée :
 - ✓ Un appel est automatiquement lancé vers les numéros de votre choix
 - ✓ Une communication directe avec le porteur est établie
 - ✓ Un **SMS et un e-mail** et notifications sont envoyés aux référents avec la **localisation exacte**
-

Alerte batterie faible

- ✓ **20% d'autonomie restante** : envoi automatique d'un **mail et SMS d'alerte**

Réseaux GSM | GPRS | Fonctionnement international

- ✓ Compatible avec les réseaux mobiles mondiaux
 - ✓ **Alertes transmises en temps réel à un nombre illimité de référents**
-

Bouton SOS

- ✓ **Appel immédiat vers 1 numéro de votre choix**
 - ✓ Envoi automatique de **SMS et e-mails** vers autant de référents que souhaité
-

Déplacement motorisé

Votre parent est à bord d'un véhicule Vous définissez à distance par sms la vitesse de déplacement autorisé Vous êtes alerté si le déplacement est supérieur à la vitesse autorisée. Un SMS indiquant le lieux (lien Google Maps) du déplacement est envoyé vers un nombre illimité de personnes. Un mail est envoyé vers un nombre illimité de personnes.

- ✓ Détection d'un **déplacement motorisé inhabituel**
- ✓ Possibilité de **définir une vitesse maximale autorisée**
- ✓ Envoi d'une **alerte SMS et e-mail** aux référents en cas de dépassement

Autre nouveauté 2025

Une Borne pour une localisation à la Maison

Une géo sécurité optimale à l'intérieur comme à l'extérieur !

La **borne de surveillance intérieure** est un **dispositif compact de 5 cm**, conçu pour assurer une **localisation et une surveillance précises** au sein du domicile de votre proche.




📍 Détection de présence et de mouvements

- Cette borne détecte **les déplacements et l'activité** à l'intérieur du logement.
- Elle permet de recevoir **des alertes en temps réel** en cas de **mouvements inhabituels**, garantissant une **réactivité immédiate** en cas d'anomalie.

🌡️ Contrôle de la température ambiante

- La borne surveille en permanence la **température intérieure** du domicile.
- En cas de **panne de chauffage** ou de **canicule**, une **alerte peut être déclenchée** pour prévenir les aidants et intervenir rapidement.

Un dispositif discret, intelligent et efficace pour renforcer la sécurité de votre proche à domicile.

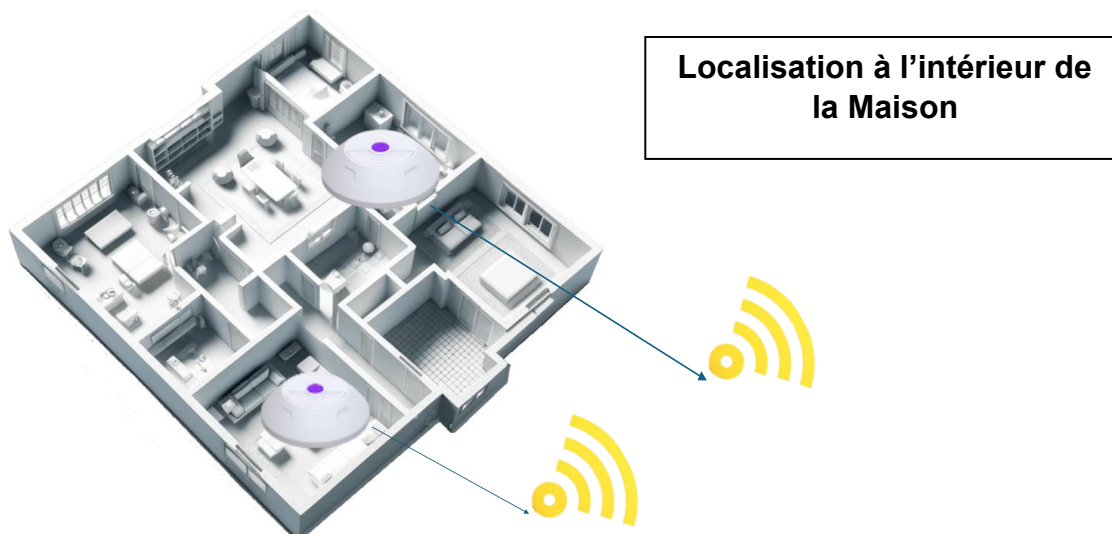



Pourquoi choisir la balise Mediwalk ?



- ◆ Liberté & confidentialité : vous choisissez votre propre carte SIM, garantissant une utilisation privée et sécurisée.
- ◆ Utilisation sans limites : fonctionne partout, même à l'étranger, grâce à la compatibilité avec les réseaux GSM.
- ◆ Sans recharge et sans abonnement : une solution autonome, sans coûts cachés.
- ◆ Plateforme de localisation privée et gratuite : hébergée en France, accessible aux particuliers et aux professionnels (*sous conditions*).
- ◆ Application mobile & tablette gratuite : disponible sur iOS et Android.
- ◆ Localisation rapide en mode urgence : possibilité de recevoir une position instantanée par SMS.

Un design pratique et sécurisé

- ✓ Texture agréable, légère et simple d'utilisation.
- ✓ Batterie interchangeable pour une longévité optimale.
- ✓ Port au poignet possible avec un bracelet sécurisé (*en option*).



Sécurité & Garantie


- ◆ Appels entrants et sortants simplifiés pour une communication fluide.
- ◆ Garantie 3 ans avec échange neuf
- ◆ Enregistrement illimité de référents : alertez autant de proches que nécessaire.
- ◆ Définition de périmètres d'alerte : sortie, entrée, itinéraire sécurisé.
- ◆ Équipe technique disponible pour un accompagnement personnalisé.
- ◆ Déjà utilisée dans plusieurs établissements de santé, validée par des professionnels.

Une solution fiable, intuitive et sans abonnement, pour une sécurité totale en toute liberté !



A qui est destinée La Téléalarme Color Box MEDIWALK® ?

Notre **ColorBox VP2** est une solution de **géo sécurité** parfaitement adaptée à plusieurs profils nécessitant un **dispositif d'alerte rapide et simplifié**.



Pour les personnes en perte d'autonomie

- ✓ **Personnes atteintes de troubles cognitifs** (perte d'orientation, Alzheimer et maladies apparentées).
- ✓ **Personnes âgées isolées** présentant un **risque d'accident domestique**.
- ✓ Un système d'alerte immédiat pour **prévenir les aidants en cas de besoin**.

Pour les parents soucieux de la sécurité de leurs enfants

- ✓ Suivi de l'**itinéraire scolaire** en temps réel.
- ✓ Alertes en cas de **déviation de trajet** ou de sortie de zone.
- ✓ Confirmation de l'**arrivée à l'école ou au domicile**.
- ✓ Possibilité pour l'enfant de **déclencher une alerte** en cas de difficulté.


Pour les voyageurs isolés

- ✓ Partage en temps réel de **la position avec la famille**.
- ✓ Consultation de l'**historique des déplacements**.
- ✓ Possibilité de **déclencher une alerte** en cas de situation d'insécurité.
- ✓ Dépôt de **messages avec adresses des étapes** sur la plateforme.

Pour les travailleurs isolés

- ✓ **Partage de localisation en continu** pour garantir la sécurité sur le terrain.
- ✓ Déclenchement d'une **alerte discrète et rapide** en cas de danger.
- ✓ Gestion multi-utilisateurs : accès à la plateforme possible via **plusieurs sous-comptes** pour un suivi optimisé.

Une solution flexible et sécurisée, adaptée aux besoins de chacun, sans abonnement !

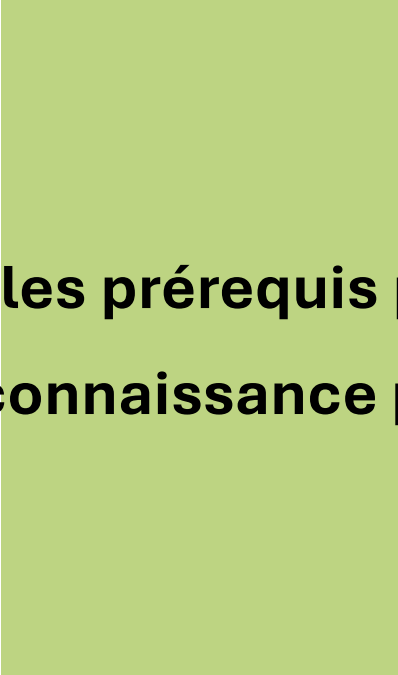

**Quelles sont les prérequis pour l'aidant ?
Faut-il une connaissance particulière ?**

Quels sont les prérequis pour l'aidant ?

Pour utiliser efficacement la **ColorBox VP2** et exploiter ses fonctionnalités, certaines compétences et équipements sont recommandés.

◆ Prérequis généraux

✓ **Un ordinateur (PC ou Mac)** est recommandé pour accéder à l'espace de gestion sur notre plateforme web.

✓ **Assistance disponible** : l'aidant peut être accompagné par téléphone par l'un de nos opérateurs (*une autorisation écrite par courriel sera requise*).

Utilisation mobile – Suivi en temps réel

✓ **Un smartphone** (Android ou iOS) est fortement recommandé pour :

- Localiser le proche en **temps réel** via l'application.
- Recevoir le **lien d'alerte** permettant d'accéder immédiatement à la position du proche.
- Naviguer facilement dans le menu de l'application.

Navigation sur la plateforme web

✓ Une **connaissance de base** en navigation internet est utile :

- Accéder à la page de connexion de la plateforme.
- S'identifier avec ses accès sécurisés.
- **Actualiser une page web** si nécessaire (*bouton actualiser du navigateur*).

Fonctionnalités accessibles sans compétences particulières

✓ **Appels entrants** : aucun réglage ou connaissance spécifique n'est requis.

✓ **Activation/Désactivation des fonctions** : savoir envoyer un **SMS** à la balise pour activer ou désactiver certaines fonctionnalités.

✓ **Gestion par SMS :**

- Mise en veille
- Activation de la **détection de chute** et des alertes
- Réception d'un **accusé de réception SMS** de la ColorBox après chaque commande envoyée

Mise en place des périmètres de sécurité (optionnel)

✓ Pour configurer les **périmètres d'alerte (sortie, entrée, déviation de trajet)**, l'aidant doit utiliser **l'interface de la plateforme web**.

Un dispositif simple à utiliser, avec un accompagnement possible en cas de besoin.

Un accès privé à notre plateforme de géo sécurité



Un accès privé à notre plateforme de géo-sécurité

Dès l'activation de votre **ColorBox VP2**, vous bénéficiez d'un **accès sécurisé et personnel** à notre **plateforme de géo-sécurité**.

✓ **Accès privé** : chaque utilisateur dispose de **ses propres identifiants sécurisés**.

✓ **Multi-connexion** : possibilité de partager l'accès avec plusieurs aidants.

✓ **Accessible partout** : connexion depuis un **ordinateur, une tablette ou un smartphone**.

✓ **Gestion des alertes en temps réel** : suivi précis des déplacements, alertes de sortie de zone, historique des positions.

✓ **Interface intuitive et simple d'utilisation**.

Un espace sécurisé pour une gestion optimale de la protection de votre proche, sans abonnement !





Recommandations
Pour une utilisation optimale

Pour garantir une sécurité optimale et un fonctionnement fiable de votre ColorBox VP2, il est essentiel de suivre ces recommandations :

Connaissance du manuel d'utilisation

✓ Se familiariser avec le manuel pour comprendre toutes les fonctionnalités et réglages.

Recharge quotidienne

✓ Une recharge par jour est recommandée pour assurer une autonomie optimale.

✓ Pour une personne en perte d'autonomie ou atteinte de troubles cognitifs, il est essentiel d'assurer au moins une visite quotidienne afin de vérifier que la ColorBox est bien rechargée.

Vérification du bon fonctionnement

✓ À distance ou sur place, assurez-vous que votre ColorBox fonctionne correctement :

- Test du bouton SOS.
- Vérification des appels entrants et sortants.
- Contrôle de la charge de la batterie.
- Vérification du réseau opérateur.

Une balise qui ne remplace pas une surveillance humaine

✓ La ColorBox VP2 est un outil de téléassistance, mais ne peut en aucun cas se substituer à une présence humaine active.

✓ Une surveillance régulière et des visites restent indispensables pour assurer la sécurité de la personne équipée.

Un suivi régulier garantit une utilisation efficace et une protection optimale !

 **Avis clients**

Sur la ColorBox MediWalk

★ Avis clients sur la ColorBox MediWalk

 **Nadia S. – Publié le 10/02/2025**

★★★★★ « Le dispositif a permis de le retrouver rapidement ! »

"Mon papa est équipé de la balise. Il est en maison de repos et doit montrer qu'il l'emporte pour aller se promener seul. Ce week-end, le dispositif a permis de le retrouver rapidement quand il n'est pas rentré au coucher du soleil. Nous allons installer les alertes de distance maximale et de vitesse de déplacement pour être avertis s'il prenait à nouveau l'autobus ou s'il s'égarait loin du foyer."

 **Jean-Pierre B. – Publié le 28/01/2025**

★★★★★ « Cela nous a changé la vie ! »

"Accompagnant une personne souffrant d'Alzheimer, la montre a été d'un grand secours. Nous utilisons la montre depuis quelques mois, cela nous a changé la vie. Fournisseur très à l'écoute pour l'aide à la mise en place. Très bon produit."

 **Bernadette G. – Publié le 23/01/2025**

★★★★★ « Pratique, très fiable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur »

"J'utilise maintenant depuis 2 années la ColorBox. Pratique, très fiable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle permet de suivre la personne en continu. Beaucoup d'options permettent d'adapter l'appareil à l'évolution du handicap. D'autre part, MediWalk assure un suivi très performant dans le temps, même 2 ans après l'achat. La personne au téléphone est toujours accueillante et bienveillante."

 **Yannick C. – Publié le 11/03/2024**

 « Le contact est clair, l'écoute est présente »

"Le contact est clair, l'écoute est présente. Ma balise a été endommagée. J'ai expliqué mon problème, envoyé une photo et ils m'ont simplement dit d'envoyer la balise pour voir s'ils pouvaient la réparer. Ce sont des experts qui connaissent bien le suivi des maladies comme Alzheimer. J'ai déjà eu besoin de leur service deux fois en 3 ou 4 ans et l'accueil est toujours bienveillant et familial. Un grand merci."

 **Isabelle N. – Publié le 02/03/2024**

 « La balise MediWalk est un outil très précieux »

"La balise MediWalk est vraiment un outil très précieux pour assurer la sécurité de la personne qui la porte et rassurer son entourage. Après quelques mois sans l'utiliser, j'ai eu un peu de mal à me réapproprier son mode d'emploi et celui de la plateforme, ce qui m'a frustrée au début. Heureusement, l'assistance téléphonique est excellente. Merci à Thomas pour son écoute, sa patience et ses explications claires. Ce service est aussi précieux que la balise elle-même !"

 **Katy P. – Publié le 09/11/2023**

 « Qualité de l'écoute de leur équipe »

***"En tant que parent d'un enfant autiste, chaque jour comporte son lot d'inquiétudes et de défis. Trouver des outils qui apportent une aide réelle et efficace n'est pas évident. Heureusement, nous avons découvert la téléalarme MediWalk, qui a considérablement changé notre quotidien.**

Mon fils utilise la téléalarme depuis quelques mois, et le système de suivi a renforcé mon sentiment de sécurité. Les alertes de sortie et d'entrée de périmètre sont particulièrement utiles pour gérer les déplacements sereinement.

Ce que j'apprécie le plus chez MediWalk, c'est la qualité de l'écoute de leur équipe. À chaque question ou besoin d'assistance, les réponses sont rapides, professionnelles et surtout empreintes de compréhension. Merci à toute l'équipe de MediWalk pour votre dévouement et pour proposer un produit qui rassure les parents tout en offrant plus de liberté aux enfants dans un cadre sécurisé."*

 Laurence G. – Publié le 20/05/2020

 « Pour protéger les gens que l'on aime »


"Mon fils atteint d'un handicap mental porte la balise (en montre) depuis plus d'un an. Fini pour nous l'angoisse lors de ses escapades. Nous pouvons aussi lui montrer où il se trouve. Géolocalisation remarquable. Il a aussi compris que sa balise était notre lien lors de nos absences, et que nous étions toujours là pour lui... Rassurant pour lui, comme pour nous. Cet appareil, destiné à l'origine aux personnes atteintes d'Alzheimer, est aussi remarquable pour les personnes porteuses d'un handicap. La balise MediWalk, un repère inestimable pour protéger les gens que l'on aime. Cela n'a pas de prix."

 Philippe L. – Publié le 20/03/2020

 « Je considère la balise MediWalk comme totalement indispensable ! »


"Après avoir essayé 4 autres systèmes, ma mère est équipée de la balise MediWalk depuis 10/2019. Après 5 mois d'utilisation, je peux dire que je suis très satisfait de la fiabilité, du fonctionnement simple de la balise, et de la disponibilité de mon conseiller. J'utilise très régulièrement et principalement les fonctions de géolocalisation (PC & smartphone) et d'appel, qui garantissent beaucoup de sécurité à ma mère et de tranquillité pour moi. Je considère la balise MediWalk comme désormais totalement indispensable pour préserver son autonomie."

 **Charles P. – Publié le 25/04/2019**

 « Sans MediWalk, nous n'aurions jamais imaginé la rechercher à cet endroit ! »

"Nous utilisons MediWalk depuis maintenant 1 an, pour ma grand-mère atteinte d'Alzheimer. Ce qui nous avait amené à privilégier MediWalk était principalement d'ordre pratique et financier : une solution à 2 boutons, facile à mettre en place et à utiliser, sans abonnement et où les proches sont avertis facilement par SMS. Cela permet à mon grand-père et à son entourage d'être plus rassurés puisqu'ils peuvent suivre ma grand-mère via l'interface web ou les SMS.

Un jour, nous avons perdu ma grand-mère et grâce à l'application en temps réel, nous l'avons retrouvée à plusieurs kilomètres. Sans MediWalk, nous n'aurions jamais imaginé la rechercher là-bas ! Une solution simple, pratique et efficace."

 **Miel M. – MEDIWALK**

 « Très facile d'utilisation et extrêmement rassurant ! »

"ColorBox : Je confirme la simplicité et la fiabilité de MediWalk pour retrouver un proche sorti de la zone. Cela nous a sauvé la mise plusieurs fois et évité d'appeler les forces de l'ordre pour disparition. Très facile d'utilisation et extrêmement rassurant. Localisation très précise. Communication avec la balise via SMS simple et rapide. Merci aussi au support téléphonique pour la mise en place."

 **Isosox B.**

 « Merci au conseiller qui m'a pris en charge ! »

"J'ai acheté une balise MediWalk, et j'en suis très satisfait. Bonne autonomie, très pratique et facile d'utilisation, et surtout très précise. Les paramètres sont

nombreux et utiles. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le service client : disponible, à l'écoute et très professionnel. Merci au conseiller qui m'a accompagné."

 **Aline D.L. – ColorBox**

 « Elle apporte une sécurité qui simplifie vraiment la vie »

"J'ai choisi cette balise pour un de mes proches, malade d'Alzheimer. Très simple d'utilisation, la plateforme est bien faite, et le service d'assistance est très réactif. Elle apporte une sécurité qui simplifie vraiment la vie et nous a permis de retrouver un peu de sérénité. J'en suis très contente et je la recommande vivement !"

 **Nicolas L. – ColorBox**

 « Très satisfait de mon achat ! »

"J'ai acheté un traceur GPS pour mon père atteint de la maladie d'Alzheimer. Très satisfait de mon achat, c'est un matériel vraiment performant. Je peux le localiser à tout moment sur mon téléphone sans aucune difficulté, pour un coût très raisonnable. Merci également pour la disponibilité et la compétence du service client."



Détail du Pack Téléalarme et prix

Prix : 248Eur

Prise en charge possible APA (achat petit matériel)

Caisses de retraite et Mutuelles

MDPH

Dans le cadre du maintien à domicile, la sécurité



Balise Téléalarme 4G Mediwalk	1
Station de rechargement	1
Tour de cou	1
Accroche clés	1
Prise 220V	1
Cordon USB Magnétique	1
Bouchons Waterproof	3
Tournevis	1
Borne BLE	1
Manuels FR	2
Accès illimité Plateforme	Multi

Options

Bracelet Montre (inclus 1 Fermeture de sûreté)	22Eur
Clip Ceinture	18Eur
Borne Supplémentaire BLE	29Eur
Garantie Privilège* (1 année)	84Eur




*Garantie privilège

Couvre tous les dommages hors garantie pendant une année renouvelable, offrant aux utilisateurs la tranquillité d'esprit qu'ils méritent. En cas de dommage, Mediwalk remplacera ou réparera sans frais votre balise color box, évitant ainsi tout coût supplémentaire, pour tout traitement SAV, une balise de remplacement vous est adressée dès réception de votre déclaration de panne.



Mediwalk®

229 Rue Solférino
59000 Lille

 0972459315

www.mediwalk.fr

